

MaskyPlus

MASCHERA PROTETTIVA RIUTILIZZABILE

MADE IN ITALY

CODICE PRODOTTO

PA26460

DESCRIZIONE PRODOTTO

Maschera protettiva riutilizzabile con filtro lavabile intercambiabile, ad uso generico.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- A. Mascherina
- B. Boccaglio
- C. Ghiera
- D. Filtro in TNT
- E. Fasce elastiche
- F. Regolatori

COMPOSIZIONE

- Mascherina: compound di TPE a base HSBC in accordo con regolamento (CE) nr. 1907/2006 (REACH - Allegato XVII - XIV - "Candidate list" di sostanze SVHC), regolamento (UE) nr. 10/2011, regolamento (CE) nr. 1935/2004, regolamento (CE) nr. 2023/2006, FDA CFR 177.1810, FDA CFR 177.1520, FDA CFR 177.2600, EN 71, Part 9 ed. 2005 + A1 2007.

- Boccaglio, ghiera e regolatori: PA6 in accordo con regolamento (UE) nr. 1272/2008 (CLP), regolamento (CE) nr. 1907/2006 (REACH - Allegato XVII).

- Filtro in TNT riutilizzabile: 45% PES 55% PP certificato OEKO-TEX Standard 100 Classe II, certificato ad uso medico di tipo I secondo UNI EN 14683:2019.

- Fasce elastiche: 60% filato di poliestere, 40% gomma da lattice*, certificato OEKO-TEX Standard 100.

* Le fasce elastiche contengono lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO

- Lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica prima di maneggiare gli accessori.
- Inserire il boccaglio (B) nel foro della mascherina vedi fig. 2, esercitando la pressione necessaria per il suo completo inserimento.
- Posizionare il filtro in TNT (D) nella sede esterna del boccaglio (B), vedi fig. 3.
- Appoggiare la ghiera (C) sopra il filtro (D), esercitando pressione sul bordo della ghiera fino ad avvenuto aggancio, vedi fig. 3.
- Inserire le fasce elastiche (E) negli appositi fori, bloccandole con i regolatori (F), regolare a misura.

METODI DI STERILIZZAZIONE PER LA MASCHERINA

- Separare i diversi componenti della maschera (mascherina, boccaglio e ghiera).
- Opzione 1: Immergere i componenti in acqua in ebollizione per circa 5 minuti.
- Opzione 2: Disinfettare i componenti con soluzione alcolica.
- Asciugare accuratamente tutti gli accessori.
- Lavare filtro TNT a mano o in lavatrice a 30°C, fino a 10 volte.

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). Non costituisce un Dispositivo Medico (DM). Non ha marcatura CE. Rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le misure anti contagio attualmente in vigore.




Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni, se avete dubbi sull'interpretazione del contenuto contattare il rivenditore o il fabbricante.

Pulire e verificare l'integrità degli accessori prima e dopo ogni utilizzo, sostituirli in caso di danneggiamento.

Non lasciare incustoditi gli accessori in quanto se ingeriti dai bambini potrebbero costituire pericolo di soffocamento.

Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e asciutto.

Fabbricato secondo l'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

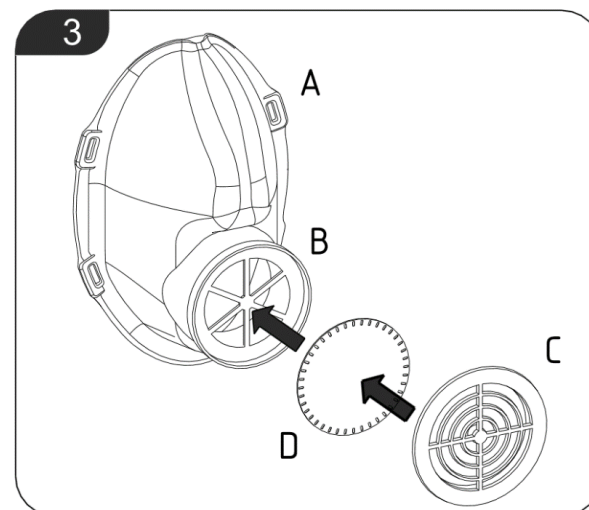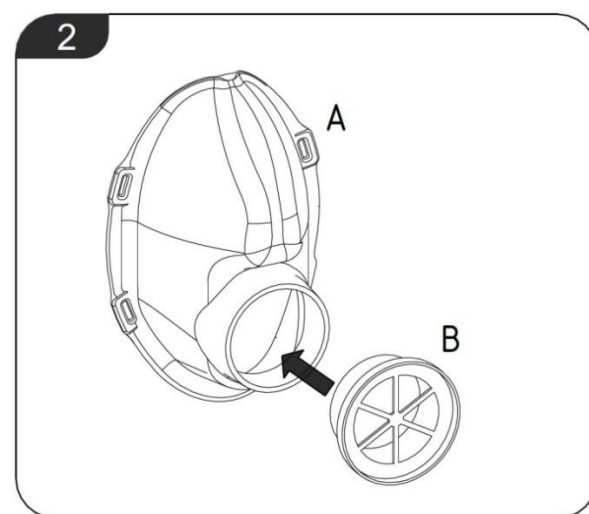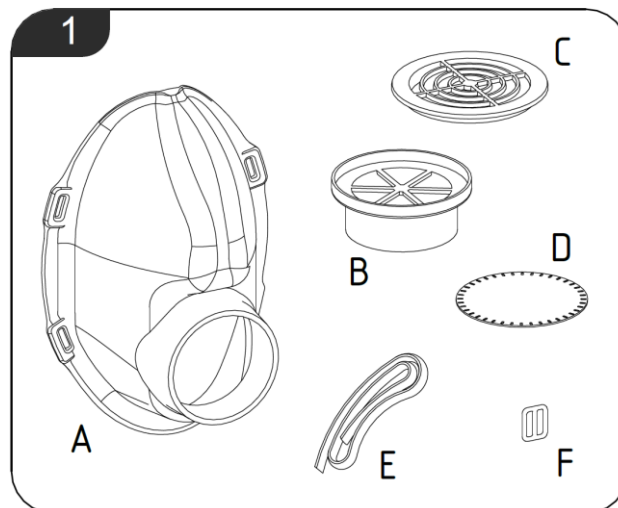

PRODUTTORE

Bertoli Antonio Srl
Via Cercone, 18
24060 – Castelli Calepio (BG) – Italy

www.bertoli.it

